

4. Правила пользования.

С линзой можно работать как в освещенном, так и в затемненном помещении. Освещение глазного дна осуществляется щелевой лампой, офтальмоскопом или стационарным источником света.

Линза устанавливается на глазное яблоко под веко исследуемого глаза и придерживается рукой врача. Контакт между роговицей исследуемого глаза и линзой осуществляется через слой импрессионной жидкости, например – 2% раствор метилцеллюлозы.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Линза Гольдмана
соответствует конструкторской документации и
признана годной для эксплуатации.

Гарантия на изделие 12 месяцев со дня продажи.

Инспектор качества _____



ЛИНЗА ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ГОЛЬДМАНА

Паспорт



Производитель: ООО "Поиск ТР"
РУ ФСР 2009/05686 от 06.08.2018
Сертификат соответствия 0015896 от 26.09.2018

Поверке не подлежит в соответствии
с письмом Росздравнадзора 29.03.2007 г. N 01И-231/07

г. Москва

2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линза применяется для исследования и лечения глазного дна, сетчатки глаза, гониоскопии передней камеры глаза. Линза Гольдмана обеспечивает наблюдение центральной части глазного дна непосредственно через центральную часть линзы, парацентральной и периферической частей глазного дна и угла передней камеры глаза - через соответствующие грани линзы.

2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Классическая линза Гольдмана имеет три зеркала, повернутых под углами 59°, 66° и 73°, что позволяет одновременно увидеть периферию глазного дна и угол передней камеры.

Линза Гольдмана изготовлена из оптического стекла и закреплена герметично в пластмассовом корпусе.

Технические характеристики линз Гольдмана.

Размеры, мм х мм	41х33
Увеличение	0,94х
Материал линзы	Оптическое стекло К-8
Контактный диаметр, мм	18
Высота линзы, мм	32
Световой диаметр, мм	33
Фокусное расстояние, мм	15
Масса, г	43

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Следует оберегать линзу от ударов и механических повреждений, оптическую поверхность от царапин и загрязнения.

Стерилизацию линзы Гольдмана проводят при помощи 6% раствора перекиси водорода в соответствии с ОСТ 42-21-2-85.

Наружные поверхности линзы Гольдмана должны выдерживать дезинфекцию химическим методом по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Оптические поверхности допускается чистить спиртоэфирной смесью (85% спирта и 15% эфира) согласно ОСТ -3-64.19-88.

Пыль с поверхности линзы следует смахивать беличьей или колонковой обезжиренной кисточкой.

Следует оберегать линзы от ударов, механических, термических и прочих повреждений, оптические поверхности линз - от царапин и загрязнений. При работе с линзами следует держать их за оправы, не касаясь оптических поверхностей.

Запрещается:

- промывка и протирка спиртом; промывка, стерилизация, ополаскивание водой и раствором имеющем температуру выше 30°C и ниже 5°C;
- хранение линз в непосредственной близости от источника тепла или холода, кислот, щелочей и других веществ, подверженных гниению и выделяющих химически активные пары и газы.